

# Prevent Seal

Pierwszy materiał do lakowania bez konieczności wytrawiania

**PRACUJ ŁATWIEJ  
I SZYBCIEJ!**



Cienkie końcówki aplikacyjne

Stożkowe szczoteczki do czyszczenia bruzd i szczelin

## ZALETY

Samowytrawiający

- ▶ Należy tylko oczyścić, nanieść i naświetlić
- ▶ Nigdy więcej wytrawiania i problemów z wypłukiwaniem wytrawiacza
- ▶ Zwiększony komfort pracy i prawdziwa oszczędność czasu

Znakomita siła łączenia ze szkliwem (21 MPa)

- ▶ Długotrwały efekt lakowania

Optymalna konsystencja i plastyczność

- ▶ Doskonale się rozprowadza w bruzdach i szczelinach

Uwalnia fluor

- ▶ Lepsze zapobieganie próchnicy

Biały odcień

- ▶ Ułatwia aplikację i późniejszą kontrolę

Dostępny z cienkimi końcówkami aplikacyjnymi oraz stożkowymi szczoteczkami do czyszczenia bruzd i szczelin

- ▶ Łatwe czyszczenie bruzd i szczelin
- ▶ Precyzyjna i ekonomiczna aplikacja materiału

C l i n i c a l   E x c e l l e n c e

## PROCEDURA KLINICZNA



1

Widok przed zabiegiem



2

Oczyścić używając szczoteczki i sprayu wodnego



3

Osuszyć strumieniem powietrza



4

Nałożyć Prevent Seal



5

Pozostawić na 15 sekund



6

Naświetlać przez 20 sekund



7

Efekt końcowy

## WSKAZANIA

Stosowanie samowytrawiającego materiału do profilaktycznego lakowania bruzd i szczelin:

- bruzdy i szczeliny są szczególnie podatne na próchnicę, ponieważ należą do miejsc trudnych do czyszczenia,
- lakowanie za pomocą Prevent Seal - samowytrawiającego materiału do lakowania bruzd i szczelin zapewnia ochronę powierzchni podatnych na próchnicę poprzez ich zabezpieczenie za pomocą wodoodpornej warstwy żywicy, która zapobiega przed wnikaniem bakterii i wspomaga higienę jamy ustnej.

## OPAKOWANIA

### PREVENT SEAL

Strzykawka 1.2 ml + 10 ultra cienkich końcówek aplikacyjnych 25G + 3 stożkowe szczoteczki do czyszczenia bruzd i szczelin	PVSEAL - 1.2
---	--------------

### AKCESORIA

20 ultra cienkich końcówek aplikacyjnych 25G	PVSE - 25G
15 stożkowych szczoteczek do czyszczenia bruzd i szczelin	PVBRO-15

**"Preveat Seal? Żadnego wytrawiania, przepłukiwania, żadnych problemów!"**

**Dr Thomas Lormeau - Dinan**

**"Oczyść, nanieś, naświetl: ułatw sobie życie!"**

**Dr Cecilia Jeanningros - Paris**

specjalistyczne zaopatrzenie stomatologiczne

[www.marku.com.pl](http://www.marku.com.pl)

### Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego "MARKU" sp.j.  
42-226 Częstochowa, ul. Loretańska 31  
tel. 34 367 00 00, fax 34 368 82 50  
e-mail: dental@marku.com.pl

