
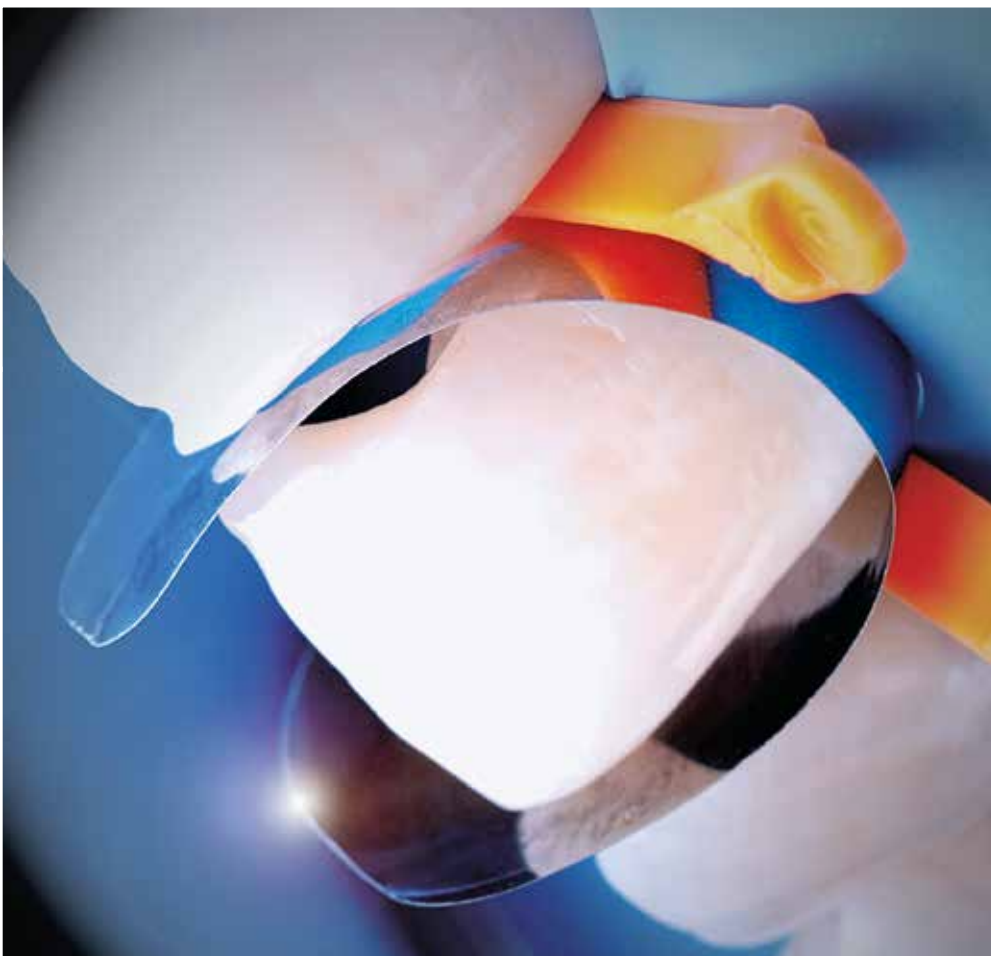


polydentia

katalog produktów



unica Anterior
unica Proximal Anterior
myQuickmat Forte
myClip 2.0
myQuickmat Classico
myJunior
myQuickmat All-round



innowacyjne rozwiązania do odbudowy
zębów przednich i bocznych



Unica anterior jest profesjonalnym systemem formówek do odbudowy ubytków zębów przednich klasy III, IV, V, bezpośredniej stratyfikacji licówek kompozytowych i modyfikacji kształtu. Dzięki konturowanemu kształtowi formówki systemu Unica anterior i Unica minideep anterior dopasowują się prawidłowo do różnej budowy wszystkich zębów przednich. Umożliwiają one jednoczesną odbudowę obszarów proksymalnych i przyszykowych, nawet w przypadku obecności koferdamu lub nici retrakcyjnych, skracając w ten sposób czas potrzebny do odbudowy. Ponadto po umieszczeniu formówek Unica możliwa jest wizualizacja końcowego kształtu odbudowy jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu.

Unica Introkit anterior — REF 6900

20 szt. formówek Unica anterior
20 szt. formówek Unica minideep anterior
40 szt. myWedge XS
40 szt. myWedge S
40 szt. myWedge M
1 szt. myQuickmatrix Forceps

Opakowanie uzupełniające:

Unica anterior — REF 6912 12 szt. REF 6950 50 szt.
Unica minideep anterior — REF 6911 12 szt. REF 6951 50 szt.
myQuickmatrix Forceps — REF 5703
myWedge Extrasmall (XS) — REF 7101 100 szt.
myWedge Small (S) — REF 7102 100 szt.
myWedge Medium (M) — REF 7103 100 szt.



Unica anterior - klasyczna formówka Polydentia do odbudowy zębów przednich

- Ultracienka (0,03 mm) wykonana ze stali nierdzewnej
- Skrzydełka pozycjonujące ułatwiające umieszczenie formówek
- Konturowane w celu uzyskania anatomicznie prawidłowych uzupełnień protetycznych
- Łatwe opracowanie obrzeża przyszykowego

Wybierz formówkę Unica anterior w następujących przypadkach:

- siekacze przyśrodkowe szczęki
- siekacze boczne szczęki
- kły



Unica minideep anterior - jeszcze lepsze dopasowanie do małych zębów przednich

- Ultracienka (0,03 mm) wykonana ze stali nierdzewnej
- Lepsze dopasowanie przyszykowe na siekaczach i bocznych zębach żuchwy
- Skrzydełka pozycjonujące ułatwiające umieszczenie formówek
- Plastikowy materiał zapewniający jeszcze lepsze możliwości dopasowania
- Anatomicznie konturowane w celu uzyskania prawidłowych uzupełnień protetycznych przy naturalnej budowie anatomicznej

Wybierz formówkę Unica minideep anterior w następujących przypadkach:

- siekacze boczne szczęki i żuchwy
- siekacze przyśrodkowe żuchwy
- zęby stożkowate
- zęby trójkątne
- zęby boczne mikrodontyczne
- zęby o małej średnicy przyszykowej



myQuickmatrix Forceps

Kleszcze myQuickmatrix Forceps zapewniają pewny chwyt formówki podczas jej usuwania po wykonaniu uzupełnienia.

- Do łatwego usuwania formówek
- Końcówki ze specjalnym karbowaniem zapewniającym pewny chwyt
- Odporne końcówki z węgla wolframu

1 szt. myQuickmatrix Forceps — REF 5703

unica Proximal Anterior

system formówek do odbudowy zębów przednich



polydentia
swiss manufacture 

Unica Proximal to najnowsze matryce Unica do odbudowy zębów przednich, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej o grubości 0,03 mm dostępne w dwóch rodzajach (Standard i Deep). Idealnie dopasowują się do konturów zębów przednich, zarówno w płaszczyźnie wargowej, jak i podniebiennej oraz stycznej. Matryce te ułatwiają precyzyjne odbudowy klasy III i IV, zamykanie diastem oraz wykonywanie licówek.

Innowacyjny kształt matrycy umożliwia jej umieszczenie poddźwiastowo między brodawką a zębem co poprawia jej stabilność. Dzięki temu użycie klina nie jest konieczne, choć dopuszczalne.

Matryce unica Proximal zapewniają optymalne dopasowanie do zębów przednich oraz znacznie lepszą widoczność i łatwiejszy dostęp do pola zabiegowego w porównaniu do innych rozwiązań.


Unica Proximal Deep jest rekomendowana do zastosowań periodontologicznych przy mniejszych brodawkach międzyzębowych.

100 szt. Unica Proximal anterior matrices standard 0.03 mm - REF 6913

50 szt. Unica Proximal anterior matrices standard 0.03 mm - REF 6914


100 szt. Unica Proximal anterior matrices deep 0.03 mm - REF 6952

50 szt. Unica Proximal anterior matrices deep 0.03 mm - REF 6953

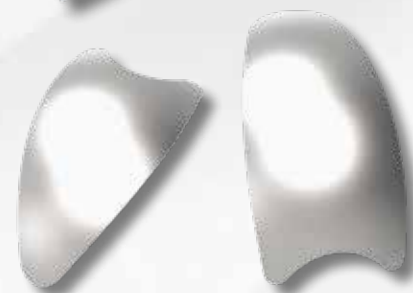

Unica proximal


Unica proximal deep

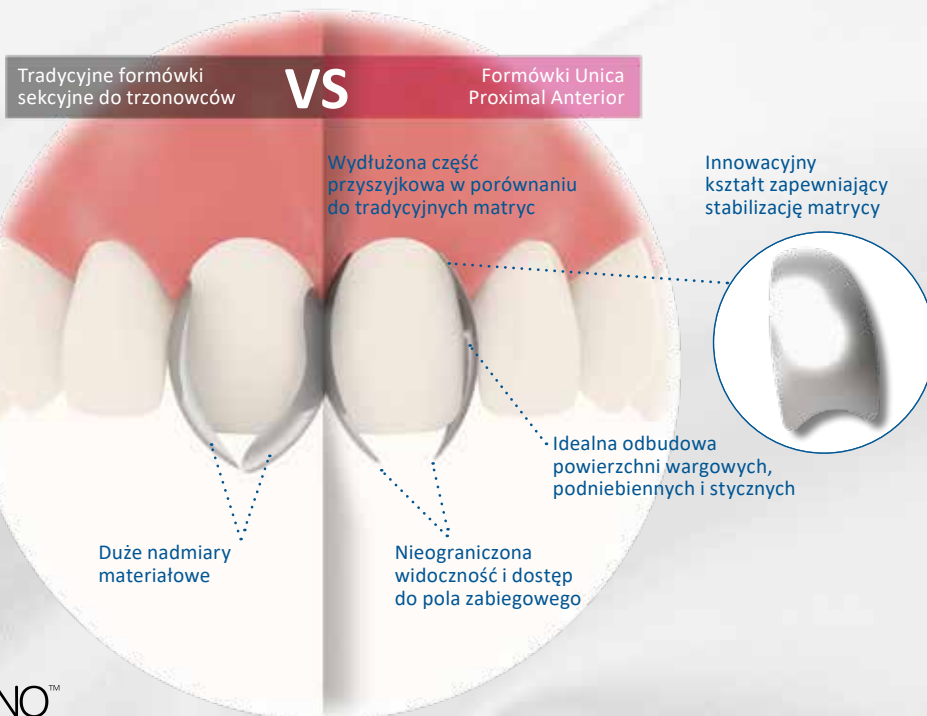

in cooperation with

STYLE ITALIANO™



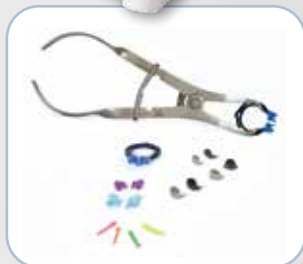

Kompletny zestaw matryc sekcyjnych opracowany w celu zapewnienia dokładnej separacji zębów, a w konsekwencji uzyskania doskonałego punktu stycznego przy odbudowie ubytków klasy II. Zestaw ten zawiera: myRing Forte – pierścień sekcyjny, który dzięki wymiennym końcówkom (myTines S, M i L) adaptuje się do sąsiednich zębów o różnych wysokościach koron klinicznych i rozległych preparacjach tkanek.

myQuickmat Forte kit — REF 6803

- 2 szt. myRing Forte
- 2 pary myTines Medium, 1 para myTines Small, 1 para myTines Large
- 50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
- 50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm
- 20 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, rozszerzone, 0,04 mm / 6,4 mm+ przedł.,
- 20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
- 20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm
- 20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, rozszerzone, 0,04 mm / 6,4 mm+ przedł.,
- 50 szt. myWedge, Extrasmall (XS)
- 50 szt. myWedge, Small (S)
- 40 szt. myWedge, Medium (M)
- 40 szt. myWedge, Large (L)
- 1 szt. myForceps

myRing Forte Refil — REF 6806


- 2 szt. myRing Forte
- 2 pary myTines M
- 1 para myTines S
- 1 para myTines L

Silna siła separacji w przypadku ciasnych punktów stycznych

Bardzo dobre dopasowanie i retencja formówki

Wymienne, zamienne i autoklawowalne końcówki z tworzywa sztucznego

Najwyższej jakości stal nierdzewna

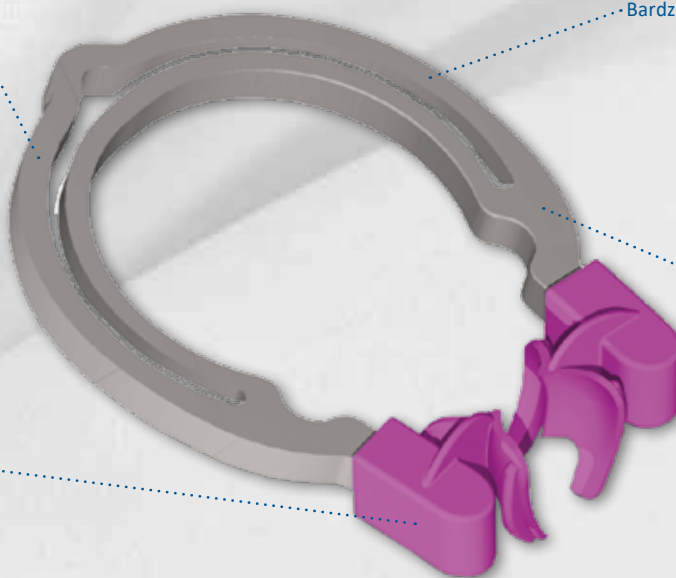

myRing Forte



myForceps

myForceps jest dedykowanym instrumentem do bezpiecznego zakładania i usuwania pierścieni sekcyjnych Polydentia: myRing Classico i myRing Forte. Ukształtowane końcówki zapewniają pewny chwyt pierścienia podczas nakładania.

- Łatwe zakładanie wszystkich pierścieni Polydentia
- Pewny chwyt
- Wysoka jakość

1 szt. myForceps — REF 5707

myQuickmat Forte starter kit

system matryc sekcyjnych



polydentia
swiss manufacture 

Sterylizowalne i wymienne końcówki myTines mogą być użyte w różnych konfiguracjach w celu poprawy dopasowania matrycy. Zestaw zawiera również myWedge – wysokiej jakości, plastikowe kliny anatomiczne oraz ciemnoniebieskie stalowe matryce – LumiContrast, które zwiększają kontrast oraz eliminują efekt „odblasku” podczas pracy w lupach lub pod mikroskopem.

myQuickmat Forte starter kit — REF 6883

2 szt. pierścieni myRing Forte,
2 pary myTines Small,
1 para myTines Medium,
1 para myTines Large,
10 szt. Matryc Sekcyjnych QuickmatFLEX (przedtrzonowce 0,03 mm / 5 mm),
10 szt. Matryc Sekcyjnych QuickmatFLEX (trzonowce 0,03 mm / 6.4 mm),
5 szt. Matryc Sekcyjnych QuickmatFLEX Molar Deep (poddziąstłowe 0,03 mm / 6.4 mm+Ext.),
10 szt. Matryc Sekcyjnych LumiContrast (przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm),
10 szt. Matryc Sekcyjnych LumiContrast (trzonowce 0,04 mm / 6.4 mm),
5 szt. Matryc Sekcyjnych LumiContrast Molar Deep (poddziąstłowe 0,04 mm / 6.4 mm+Ext.),
40 szt. Klinów myWedge (XS,S,M,L),



myTines to wszechstronne końcówki do myRing Forte i myClip 2.0, opracowane w celu precyzyjnego dostosowania formówek sekcyjnych Polydentia do szerokiego zakresu sytuacji klinicznych oraz zębów o różnych wysokościach korony. W przypadku odmiennych morfologii zębów możliwość łączenia różnych rozmiarów na tym samym pierścieniu zapewnia lepsze dopasowanie i stabilniejsze umocowanie formówki.

myTines Small bardzo dobre dopasowanie do zębów o małej wysokości.

6 par myTines Small — REF 6304

myTines Medium bardzo dobre dopasowanie do zębów o standardowej wysokości.

6 par myTines Medium — REF 6303

myTines Large bardzo dobre dopasowanie w przypadku rozległych preparacji ubytków nawet w sytuacji brakujących guzków. Asymetria skrzydełek pozwala na idealne dopasowanie do ubytków dystalnych i mezjalnych poprzez odwrócenie pozycji końcówek.

6 par myTines Large — REF 6306


6 par myTines assorted mieszane (Small, Medium, Large) — REF 6310

myTines GO szczególnie wskazane w przypadku szerokich i bardzo szerokich ubytków, brakujących guzków i nieprawidłowo ustawionych zębów. MyTines GO obejmują zęby z dala od punktu stykowego, optymalizując w ten sposób stabilność i umożliwiając anatomiczne ułożenie formówki.


6 par myTines GO — REF 6307



myTines Small

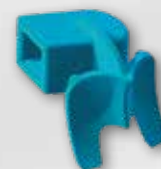

myTines Medium

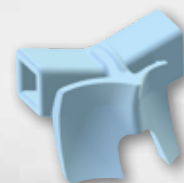

myTines Large



myTines GO



Uniwersalny pierścień do formówek sekcyjnych z krótkimi uchwytami, które działają jak kleszcze. Nie ma potrzeby stosowania specjalnych narzędzi do zakładania, ponieważ pierścień myClip 2.0 można łatwo pozycjonować palcami. myClip 2.0 charakteryzuje się optymalną siłą separacji, która pozwala na odbudowę właściwych punktów stykowych w uzupełnieniach ubytków klasy II. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie końcówek z tworzywa sztucznego (myTines Small, Medium i Large) myClip 2.0 dopasowuje się do zębów o różnych wysokościach koron i rozległych preparacjach ubytków. W przypadku odmiennych morfologii zębów, aby zwiększyć dopasowanie formówki do ścian proksymalnych można łączyć różne rozmiary myTines. Lekarze stosujący myClip 2.0 odnoszą korzyści z długiej żywotności pierścienia wykonanego z najwyższej jakości stali nierdzewnej, wymieniając w razie zużycia wyłącznie końcówki myTines.

myClip 2.0 — REF 6305

- 1 szt. myClip 2.0
- 1 para myTines Small
- 1 para myTines Medium
- 1 para myTines Large
- 5 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
- 5 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm
- 10 szt. Pinky Wood Wedges, 11 mm (XS)
- 10 szt. Wood Wedges, 12 mm (S)

myClip 2.0 — REF 6805

- 2 szt. myClip 2.0
- 2 pary myTines M
- 1 para myTines S
- 1 para myTines L

Szybkie, łatwe, jednoręczne umieszczanie pierścienia

Optymalna siła separacji

Najwyższej jakości stal nierdzewna

Wymienialne, zamienne i autoklawowalne
końcówki z tworzywa sztucznego

myClip 2.0

Quickmat FLEX, QuickmatFIT, LumiContrast

matryce sekcyjne



polydentia
swiss manufacture

QuickmatFLEX matryce sekcyjne


QuickmatFLEX to ultracienkie (0,03 mm) tytanowe matryce sekcyjne z pamięcią kształtu. Łatwe w użyciu, oferują odpowiednią równowagę pomiędzy elastycznością i sztywnością, aby zoptymalizować pozycjonowanie i adaptację w ciasnych przestrzeniach międzyzębowych. Matryce QuickmatFlex, dzięki zmniejszonej grubości i ulepszonemu stopowi metalu są odporne na odkształcenia - ich wysoka sprężystość umożliwia powrót do pierwotnego kształtu. Matryce sekcyjne QuickmatFLEX zostały ocenione jako doskonałe przez 77% klinicystów (CR Clinicians Report).

Opakowania:

100 szt. Premolar 0.03mm/5mm — REF 6785

100 szt. Molar 0.03mm/6.4mm — REF 6786

50 szt. Molar Deep 0.03mm/6.4mm + Ext. — REF 6787

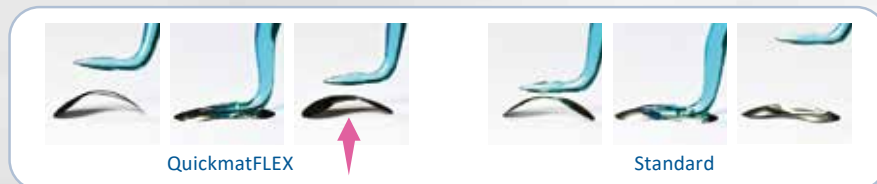

Premolar



Molar



Molar Deep

QuickmatFIT matryce sekcyjne

QuickmatFIT to nowe, anatomiczne matryce sekcyjne ze stali nierdzewnej o grubości 0,04 mm, dostępne w trzech kształtach: premolar, molar i molar deep.

Matryce QuickmatFIT są szczególnie wskazane w przypadku szerokich przestrzeni międzyzębowych i dużych ubytków. Wypustki pozycjonujące: okluzyjne, policzkowe, językowe, umożliwiają łatwiejsze i szybsze zakładanie oraz usuwanie matrycy (końcówka jest łatwa do uchwycenia kleszczami w celu prawidłowego pozycjonowania). Zwinięty brzeg okluzyjny ułatwia odbudowę krawędzi brzeżnych zęba. Uwydatniona krzywizna QuickmatFIT ściśle przylega do zęba, zapewniając lepsze dopasowanie i stabilność, ułatwiając w ten sposób uzyskanie prawidłowej, anatomicznej odbudowy.

100 szt. matryce sekcyjne Premolar 0,04 mm — REF 5835

100 szt. matryce sekcyjne Molar 0,04 mm — REF 5836

50 szt. matryce sekcyjne Molar Deep 0,04 mm — REF 5856

50 szt. matryce sekcyjne Premolar 0,04 mm — REF 5805

50 szt. matryce sekcyjne Molar 0,04 mm — REF 5806

25 szt. matryce sekcyjne Molar Deep 0,04 mm — REF 5846



Premolar



Molar



Molar Deep

LumiContrast matryce sekcyjne

Innowacyjne matryce sekcyjne. Dzięki zastosowaniu matowej niebieskiej powierzchni matryce charakteryzują się niskim współczynnikiem odbicia światła, zapobiegając refleksom świetlnym. Duży kontrast między ciemną formówką a jasnymi tkankami zęba, pozwala na precyzyjną identyfikację obszaru roboczego. Matryce LumiContrast są wykonane ze stali najwyższej jakości, są odporne na zarysowania, doskonale odwzorowują krzywizny zęba i nie ulegają odkształceniom pod wpływem klinów międzyzębowych. LumiContrast doskonale sprawdzają się przy pracy z nowoczesnymi technologiami o intensywnym świetle, takimi jak lupy i mikroskopy dentystyczne.

- Duży kontrast
- Niski poziom odbicia
- Idealne podczas używania lupy lub mikroskopu

Zestawy:

70 szt. Junior (0.04mm/3.75mm) — REF 6708

70 szt. (0.025mm/5mm) — REF 6735

70 szt. (0.025mm/6.4mm) — REF 6736

50 szt. Molar Deep (0.025mm/6.4mm) — REF 6756

70 szt. (0.04mm/5mm) — REF 6705

70 szt. (0.04mm/6.4mm) — REF 6706

50 szt. Molar Deep (0.04mm/6.4mm) — REF 6746



Premolar



Molar



Molar Deep



Kompletny system matryc sekcyjnych opracowany z myślą o delikatnej separacji zębów w celu odbudowy idealnych punktów stykowych przy wypełnianiu ubytków klasy II. Zestaw zawiera myRing Classico – klasyczny pierścień wykonany ze stopu niklowo-tytanowego. Wzmocniony pierścień w połączeniu z dołączonymi klinami Wood Wedges, zapewnia optymalną siłę separacji. Delta Tubes – anatomiczne, silikonowe końcówki, zapewniają optymalną retencję matrycy i dopasowanie do anatomii zęba. Zalecane do odbudowy rozległych ubytków. Asortyment zestawu uzupełniają matryce sekcyjne LumiContrast. Te ciemnoniebieskie matryce znacznie zwiększają kontrast i redukują efekt odbłasku, szczególnie podczas używania lupy lub mikroskopu.

myQuickmat Classico kit — REF 6801

- 2 szt. myRing Classico
- 6 par Delta Tubes
- 50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
- 50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm
- 20 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, rozszerzone, 0,04 mm / 6,4 mm+ przedł.,
- 20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
- 20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm
- 20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, rozszerzone, 0,04 mm / 6,4 mm+ przedł.,
- 50 szt. Pinky Wood Wedges, 11 mm (XS)
- 50 szt. Wood Wedges, 12 mm (S)
- 40 szt. Wood Wedges, 13 mm (M)
- 40 szt. Wood Wedges, 15 mm (L)

myRing Classico — REF 6804

- 2 szt. myRing Classico 2.0
- 2 pary Delta Tubes

Anatomicznie ukształtowane, autoklawowalne końcówki silikonowe, zapewniają optymalną retencję formówki i dopasowanie do anatomii zęba



Pierścień niklowo-tytanowy ze wzmocnieniem

myRing Classico

Delta Tubes



15 par — REF 5712

Diamond²⁴

Diamond²⁴ są anatomicznie ukształtowanymi silikonowymi końcówkami przeznaczonymi do stosowania z pierścieniem sekcyjnymi myRing Classico. Diamond²⁴ mogą być zorientowane w 24 różnych kombinacjach kształtu i długości, zapewniając optymalną retencję formówki i dopasowanie do zęba, nawet w przypadku trudnych sytuacji klinicznych.



15 par — REF 6312

myJunior kit

pierwszy system formówek sekcyjnych do stomatologii dziecięcej



polydentia
swiss manufacture 

myJunior kit to pierwszy system formówek sekcyjnych do stomatologii dziecięcej, opracowany specjalnie z myślą o mniejszych zębach mlecznych i młodych zębach stałych. Umożliwia stomatologom uzyskanie przewidywalnych uzupełnień i odpowiednich powierzchni styčných. Zestaw oferuje przyjazne dzieciom rozwiązania, które pomagają zaoszczędzić czas spędzany na fotelu i zmniejszyć niepokój dzieci.

Zestaw myJunior — REF 6330

- 1 szt. myClip Junior
- 1 szt. myRing Junior
- 5 par Cylindryczne końcówki silikonowe
- 5 par myTines Junior
- 40 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
- 40 szt. Formówki sekcyjne Junior LumiContrast, 0,04 mm / 3,75 mm
- 50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
- 50 szt. Formówki sekcyjne Junior Quickmat, 0,04 mm / 3,75 mm
- 50 szt. Pinky Wood Wedges, 11 mm (XS)
- 50 szt. Wood Wedges, 12 mm (S)
- 50 szt. myWedges XS
- 50 szt. myWedges S

myjunior
kit



myClipjunior

Uniwersalny pediatryczny pierścień do formówek sekcyjnych ze zintegrowanymi kleszczami

- Uniwersalny pierścień do formówek sekcyjnych, bez konieczności stosowania skomplikowanych kleszczy
- Pierścień wykonany z odpornego na odkształcenia stopu niklowo-tytanowego
- Optymalna siła separacji w celu uzyskania właściwych powierzchni styčných
- Szybkie, łatwe, jednoręczne umieszczanie pierścienia
- Autoklawowalne i wymienne końcówki myTines Junior z tworzywa sztucznego

2 szt. — REF 6335



myRingjunior

Pediatryczny pierścień formówki sekcyjnej pasujący do wielu różnych sytuacji klinicznych

- Niewielki rozmiar pasujący do zębów mlecznych w jamie ustnej dzieci
- Pierścień wykonany z odpornego na odkształcenia stopu niklowo-tytanowego
- Optymalna siła separacji w celu uzyskania właściwych powierzchni styčných
- Bardzo dobre dopasowanie i retencja formówki
- Autoklawowalne i wymienne końcówki myTines Junior z tworzywa sztucznego

2 szt. — REF 6336



myTines Junior

Autoklawowalne i wymienne końcówki z tworzywa sztucznego, które pasują do klina i zapewniają doskonałe dopasowanie formówki.


15 par — REF 6333



Końcówki silikonowe

Miękkie końcówki zapewniające pewniejszy chwyt i dodatkowe dopasowanie.

15 par — REF 5711

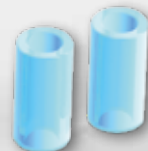

Junior Quickmat matryce sekcyjne

Profilowane matryce sekcyjne ze stali nierdzewnej.

100 szt. Junior (0.04mm/3.75mm) — REF 5708



Junior LumiContrast matryce sekcyjne

Formówki w kolorze ciemnoniebieskim, które znacznie zwiększają kontrast i redukują efekt odbłasku.

70 szt. Junior (0.04mm/3.75mm) — REF 6708





myQuickmat All-round to system formówek całkowitych, przeznaczony do wykonywania anatomicznych uzupełnień zębów bocznych z brakującymi strukturami. Łatwe w użyciu formówki Quickmat All-round umożliwiają wykonanie uzupełnień o naturalnie konturowanej anatomii i ciasnych powierzchniach styecznych. Dzięki API (Autoclavable Placement Instrument) zakładanie formówek Quickmat All-round jest stabilne i proste. API zapewnia wsparcie i zapobiega przechylaniu się szpuli napinającej podczas napinania formówki. Dzięki systemowi formówek całkowitych myQuickmat All-round można wygodnie leczyć trudne przypadki w odcinku bocznym, pracując na wolnym od przeszkód, dostępnym polu zabiegowym.

Zestaw wprowadzający myQuickmat All-round — REF 6850

2 szt. API (autoklawowalny instrument do zakładania Quickmat All-round)
 15 szt. Formówki całkowite boczne Quickmat All-round, przedtrzonowce — 0,03 mm / 5,5 mm
 15 szt. Formówki całkowite boczne Quickmat All-round, trzonowce — 0,03 mm / 6,3 mm
 45 szt. Kliny międzyzębowe The Wedge — mieszane

Polecane szczególnie do odbudowy w następujących przypadkach:

- Brak sąsiedniego zęba
- Zęby z brakującymi guzkami
- Izolacja zęba do odbudowy zrębu
- Ubytki typu MOD



Quickmat All-round

Łatwe napinanie ręką

Anatomicznie konturowane w celu uzyskania lepszych uzupełnień protetycznych i prawidłowych punktów styecznych

Ultracienkie (0,03 mm) do ciasnych punktów styecznych

API

Autoklawowalny instrument do zakładania formówek

The Wedge

Kliny międzyzębowe, które łączą w sobie elastyczność i sztywność, zapewniając optymalne dopasowanie formówki.



35 szt. formówek — przedtrzonowce 0,03 mm / 5,5 mm — REF 6855
 35 szt. formówek — trzonowce 0,03 mm / 6,3 mm — REF 6856
 2 szt. API — REF 6851

Hy-Drop

precyzyjne dozowniki płynów



polydentia
swiss manufacture 

Hy-Drop to praktyczne higieniczne dozowniki płynów kompatybilne z: alkoholem, chlorheksydyną, nadtlenkiem wodoru, podchlorynem sodu i wodą destylowaną.

Każdy Hy-Drop mieści 4 ml i po delikatnym naciśnięciu membrany aplikuje płyn kropla po kropli, zapewniając skuteczną kontrolę dozowania. Aby zapobiec pomyleniu zawartości każdego dozownika, Hy-Drop jest dostępny w pięciu różnych kolorach.

Kilka dozowników płynu można połączyć razem, aby zaoszczędzić miejsce.

Dostępne kolory: niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy i fioletowy.

Hy-Drop Forte (czarny) - przeznaczony jest do aplikacji bardziej agresywnych płynów np. Tubulicid Red, Blue, Plus.

1 szt. + 5 membran Hy-Drop — REF 5411/B, REF 5411/G, REF 5411/O, REF 5411/V, REF 5411/Y

5 membran Hy-Drop — REF 5415

1 szt. + 5 membran Hy-Drop Forte — REF 5412

5 membran Hy-Drop Forte — REF 5415



Hy-Drop



Hy-Drop Forte



Wood Wedges kliny międzyzębowe

Drewniane kliny międzyzębowe wykonane z drewna klonowego pochodzącego ze szwajcarskich lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

100 szt. 11mm (XS) — REF 5011S

200 szt. 11mm (XS) — REF 5011

100 szt. 12mm (S) — REF 5012S

100 szt. 13mm (M) — REF 5013S

100 szt. 15mm (L) — REF 5015S

100 szt. assorted (XS,S,M,L) — REF 5001

100 szt. assorted (XS,S,M,L) — REF 5040

200 szt. 11.5 mm — REF 5018

100 szt. 17mm (XL) — REF 5017S



myWedge kliny międzyzębowe

myWedge jest klinem międzyzębowym wykonanym z zaawansowanego technologicznie tworzywa sztucznego. Jego wydrążony kształt litery V umożliwia mu kompresję i dopasowanie się do anatomii przestrzeni międzyzębowych. Zapobiega uszkodzeniu brodawki, jednocześnie prowadząc i formując pasek formówki zgodnie z anatomią obszaru przyszyjkowego zęba. Unikalna geometria okrągłej główki myWedge została zaprojektowana w celu łatwego posługiwania się klinem, jego umieszczania i usuwania za pomocą standardowej pincety lub kleszczy.

- Wydrążony kształt litery V zapewniający lepsze dopasowanie przyszykowie
- Chwytna główka zapobiegająca przesuwaniu się
- Jaskrawe kolory ułatwiające identyfikację

Zestawy:

100 szt. (XS) — REF 7101

100 szt. (S) — REF 7102

100 szt. (M) — REF 7103

100 szt. (L) — REF 7104

100 szt. assorted (XS,S,M, L) — REF 7100

400 szt. assorted (XS,S,M, L) — REF 7400



Ulotka przeznaczona wyłącznie dla Użytkownika Profesjonalnego.

specjalistyczne zaopatrzenie stomatologiczne

 MARKU DENTAL sp. z o.o.  42-226 Częstochowa, ul. Loretańska 31

 marku.pl  markudental  biuro@marku.pl  e-marku.pl

 34 367 00 00  34 374 05 25 do 27  602 321 299, 784 439 470

